


Función de memoria

Visualización de registros

En el estado de apagado, presione  la tecla, la pantalla muestra los últimos resultados de la prueba. Pulse la tecla de nuevo para mostrar todos los resultados de la prueba en secuencia.

El medidor de glucosa en sangre se apaga automáticamente después de 15 segundos sin funcionar.

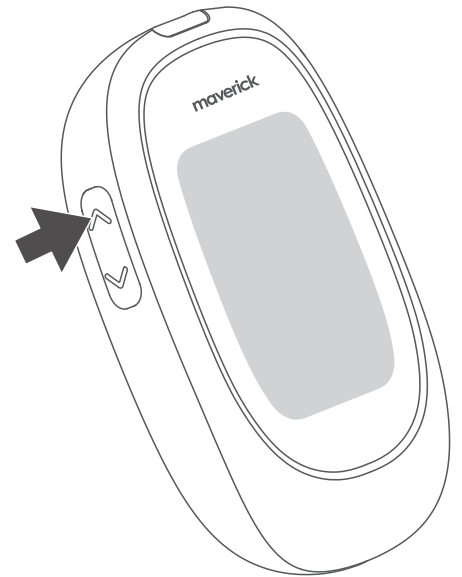


Comprobar registros

- Mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos en estado de apagado para mostrar el promedio de glucosa en sangre de 7 días.
- Pulse de nuevo la tecla  para visualizar la glucosa en sangre promedio de 14 días, 30 días, 2 meses, 3 meses.




Borrado del grupo completo

- Presione las dos teclas   a la vez por 3 segundos durante el estado de apagado o en el estado de comprobación de la memoria, aparecerá el icono "dEL" y los datos del grupo de memoria actual parpadearán en la esquina superior derecha.
- Pulse la tecla  en este punto y vuelva a pulsarla. El número de grupos de memoria cambia a 0, indicando que se ha borrado toda la memoria.

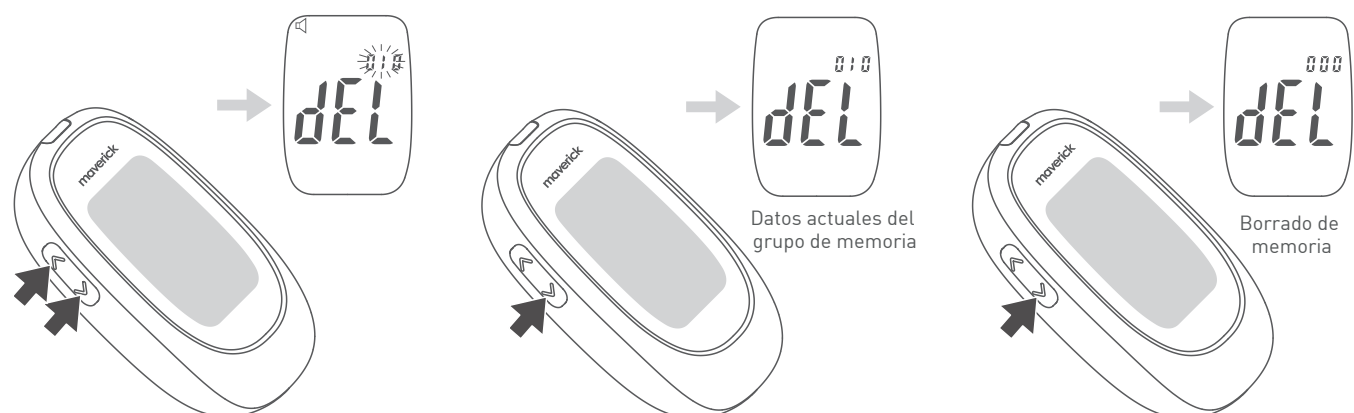

Health Care⁺

ESCANEA EL CÓDIGO QR, DESCARGA LA APP Y OBSERVA
TU CONTROL DESDE EL CELULAR.

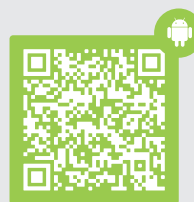



Versión 5.0
y posteriores.



Versión 4.2
y posteriores.

HealthCare + es una aplicación que funciona con Yuwell Products. Puede obtener fácilmente sus datos de salud e incluso exportarlos.

Sincroniza de forma inalámbrica las mediciones con su teléfono inteligente y accede fácilmente a sus datos de salud.

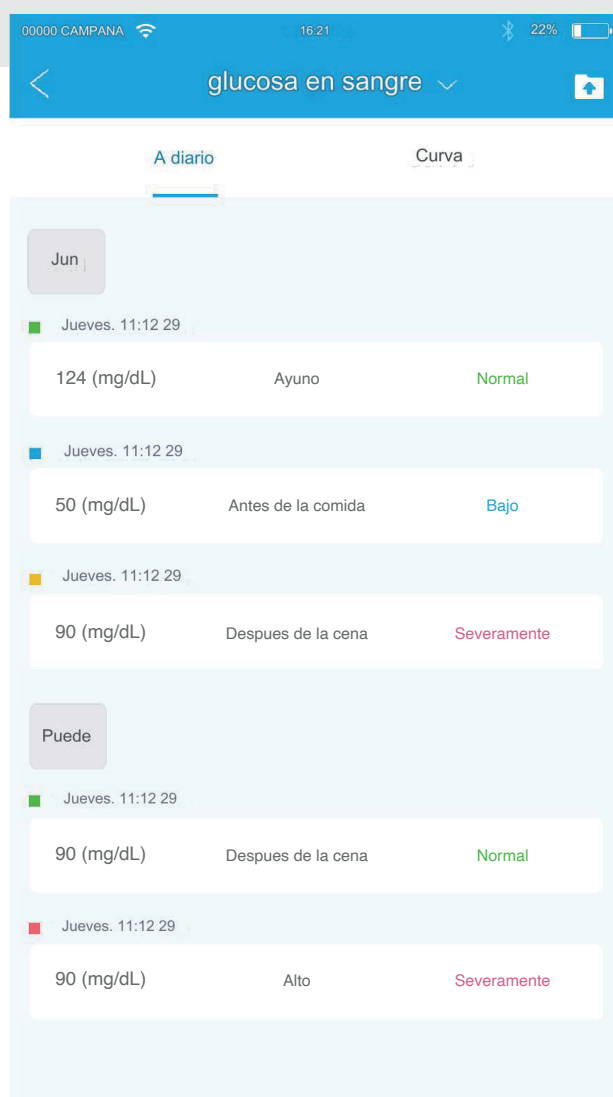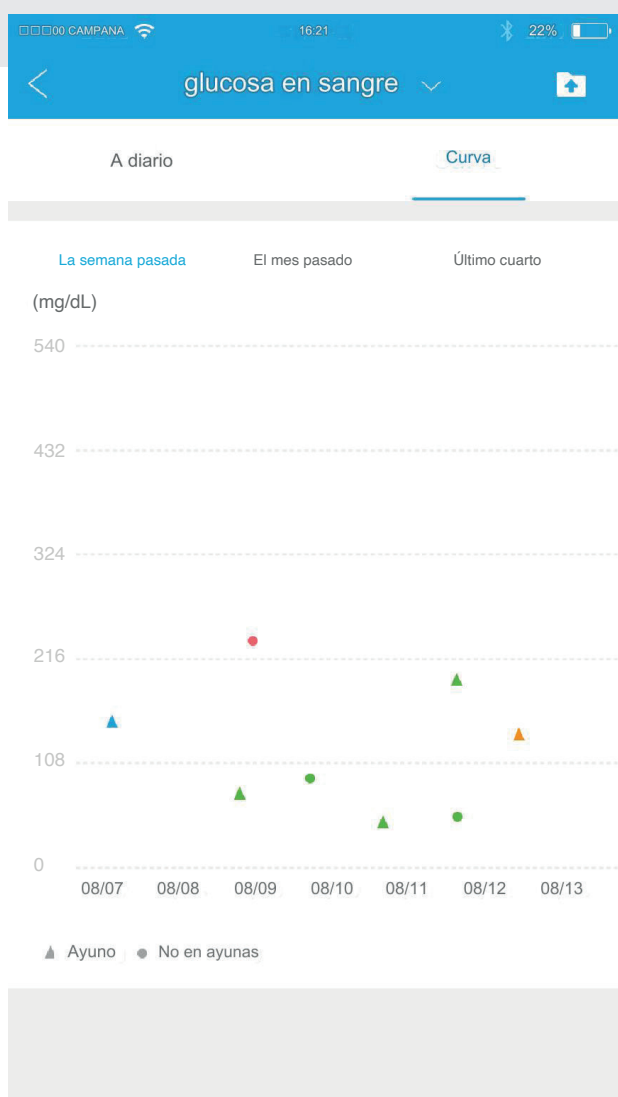

www.maverick.ar

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ☎ +54 (011) 6749-0061